


## ➤ Cama de Hospital 4 Motores 5 Posiciones OA83238



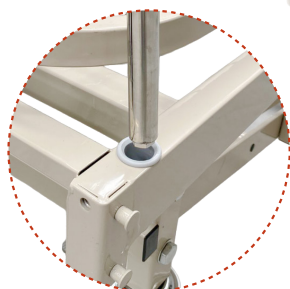











### DESCRIPCIÓN

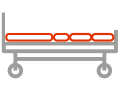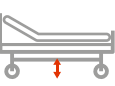La cama de hospital eléctrica con 4 motores 5 posiciones es un tipo de cama diseñada para proporcionar comodidad y facilitar el cuidado de pacientes en entornos médicos. Estas camas están equipadas con cuatro motores eléctricos que permiten ajustar diferentes secciones de la cama de manera independiente, lo que brinda una amplia gama de posiciones para el paciente.



### DATOS TÉCNICOS

 <b>LONGITUD TOTAL</b> 212 cm	 <b>ANCHO TOTAL</b> 96 cm	 <b>ALTURA TOTAL</b> 78 cm	 <b>PESO MÁXIMO DEL USUARIO</b> 175 kg
 <b>DIMENSIONES DEL SOMIER</b> 0 / 0 / 0 cm	 <b>ALTURA BASE-SUELO</b> 50 cm	 <b>ÁNGULO DEL RESPALDO</b> 80°	 <b>ÁNGULO DEL MUSLO</b> 40°
 <b>ELEVACIÓN INVERSA</b> 12°	 <b>PESO TOTAL</b> 88.5 kg	 <b>COLOR CHASIS</b> Beige	 <b>COLOR (OTRO)</b> Cabecera/Piecera: Blanco/Cafe



## CARACTERÍSTICAS

- Cinco posiciones de ajuste.
- Cuatro motores.
- Control alámbrico para ajustar posicionamiento de la cama.
- Sistema de bloqueo seguro en las ruedas para mantener la posición deseada.
- Dos perforaciones para colocar el portasuero.
- La estructura de la cama ha sido diseñada para ser transportada y almacenada fácilmente, así como para montarla y desmontarla con la misma facilidad.








## CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

### Información técnica modelo: FD60-24-A4-388.588-C52

- Voltaje de entrada: 12 V CC/24 V CC.
- Carga máx.: 6000N (Empujar) / 4000N (Tirar)
- Velocidad máxima sin carga: 33,3 mm/seg (valor típico)
- Velocidad a plena carga: 2,9 mm/s (valor típico a 6000 N cargado)
- Carrera: 50~300 mm
- Nivel de ruido:  $\leq 50$ dB
- Nivel de IP: IP42 (estático; sin acción)
- Finales de carrera preestablecidos
- Ciclo de trabajo: 10%, máx. 2 minutos. funcionamiento, continuo en 20 min.
- Temperatura ambiente de funcionamiento:  $-20^{\circ}\text{C} \sim +65^{\circ}\text{C}$
- Certificado: Norma UL 962 para muebles domésticos y comerciales.
- Cumple con la marca CE y la directiva EMC 2014/30/UE



### Mando botones:

-  Posición de sentado
-  Sección de los muslos y sentado
-  Sección de los muslos
-  Somier horizontal
-  Posición Inversa



## MATERIALES

- Estructura y desmontables de acero (esmaltado), color beige.
- Barandales de aluminio plegable.
- Cabecera y piecera de PVC (100%) color beige y cafe.
- Tornillos y tuercas de acero (galvanizado).
- Motor con voltaje de salida 110 v.
- Ruedas giratorias 360° de silicón de 5".



## FUNCIONALIDAD

	SI	NO
BARANDALES ABATIBLES	●	○
BARANDALES DESMONTABLES	●	○
CONTROL ELÉCTRICO	●	○
MANIVELA PARA PIES	○	●
MANIVELA PARA CABECERA	○	●
4 LLANTAS	●	○



## ACCESORIOS

	SI	NO
PORTA SUERO	○	●
TARJETERO	●	○
MESA	○	●



## MANTENIMIENTO

1. Lea el manual del usuario antes de usar este producto y siga todas las instrucciones de seguridad y uso.
2. Inspeccione visualmente la cama. Compruebe si las piezas presentan signos de desgaste o deterioro externo.
3. Limpie y desinfecte el producto cuando haya estado en contacto con fluidos corporales y antes de usarlo con un nuevo usuario.
4. Se recomienda usar un desinfectante para superficies a base de alcohol (con 70-90 % de alcohol).
5. Revise los puntos de lubricación de la cama y engráselos del modo adecuado, al menos cada dos años con lubricante líquido WD-40.
6. Recomendamos encarecidamente que se realice un mantenimiento completo un año sí y otro no, así como una revisión anual de los pistones.
7. Riesgo de descarga eléctrica, apague el dispositivo y desconéctelo.
8. No toque la toma de corriente con las manos mojadas.



## GARANTÍA


**Magnimed no se hace responsable de los daños sugeridos por:**

- Incumplimiento del manual del usuario
- Uso incorrecto
- Desgaste natural
- Montaje o instalación incorrectos por parte del comprador o de terceros.
- Modificaciones técnicas.
- Modificaciones no autorizadas y/o uso de recambios inadecuados.
- Por defecto de fábrica aplica sólo dentro de los 7 días después de haber recibido su compra.



## EMPAQUE

UNIDAD	Caja
CANTIDAD	1 pieza
DIMENSIONES DE LA CAJA	206 x 95 x 30.5 cm cm (largo x ancho x alto).
PESO DE LA CAJA	94.5 kg

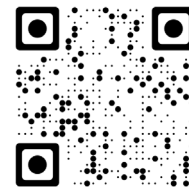

Visita nuestra página web

### ¿Necesita ayuda?

Para cualquier aclaración o preguntas relacionadas al producto llame al número **(81) 8340 4668**.

Todas las medidas contenidas en este catálogo son orientativas, sujetas a cambio y corresponden a una configuración estándar. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro departamento de Atención al cliente.